

GUIA CLINICA - LINEA VETERINARIA

EAGLENOS - L5

# ELECTROLITOS VETERINARIOS

Cinco electrolitos, un cartucho, una lectura portatil.



# Electrolitos donde los necesitas.

Una lectura portátil de cinco analitos en un cartucho para complementar la valoración veterinaria.

Eaglenos L5 — Analizador portátil de electrolitos

Eaglenos L5 mide cinco electrolitos en un solo cartucho y entrega resultados en 5 ± 0.5 minutos, con calibración integrada.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>5</b>                                                                            | <b>110 uL</b>                                                                       | <b>5 min</b>                                                                          |
| ANALITOS                                                                            | MUESTRA                                                                             | RESULTADO                                                                             |

## EN ESTA GUÍA

- 1

Del cartucho al resultado

Un flujo portátil para electrolitos en la consulta o en campo.
- 2

Electrolitos para cada paciente

Cinco analitos y perfiles preconfigurados por especie.
- 3

Listo para acompañar tu práctica

Especificaciones, costo y soporte.


# Del cartucho al resultado

Un flujo portátil para electrolitos en la consulta o en campo.



DIAGNOSTICO

DE LA MUESTRA AL RESULTADO

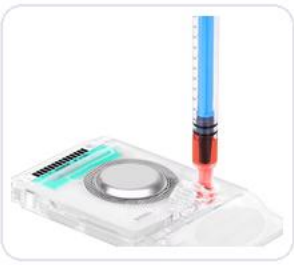

Cartucho y muestra

Carga 110 uL de sangre en el cartucho 5 en 1, conforme al protocolo validado de tu clinica.

01 Elige la especie

Selecciona el perfil correspondiente en el equipo para utilizar sus rangos de referencia preconfigurados.

02 Coloca el cartucho

Inserta el cartucho para medir K+, Na+, Cl-, calcio ionico y magnesio ionico en una corrida.

03 Consulta el resultado

Obten el resultado en 5 +/- 0.5 minutos, con la calibracion incluida en el cartucho.



SEGURIDAD

Trata la muestra como material potencialmente infeccioso y sigue el protocolo de bioseguridad de tu clinica.

# Características clave

---

Lo que hace distinto a este equipo dentro de tu consulta.



## Cinco electrolitos en una corrida

K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, calcio iónico y magnesio iónico en un cartucho 5 en 1.

---



## Resultado en 5 minutos

Tiempo de resultado de 5 ± 0.5 minutos, con calibración incluida.

---



## Calibración integrada

La solución de calibración está incluida en cada cartucho; no requiere calibración manual.

---

## Portátil y sin instalación

Batería de litio para utilizarlo en consultorio, visita a domicilio o campo.

---



## Seis especies registradas

Perfiles preconfigurados para perro, gato, oveja, conejo, caballo y ganado.

---

# ¿Para qué clínica funciona?

El formato portátil del Eaglenos L5 permite incorporar una lectura de electrolitos tanto en clínica como fuera de ella, cuando el caso lo requiere.



## Consulta de pequeñas especies

Para complementar la valoración de perros y gatos en consulta, seguimiento o procedimientos clínicos.



## Hospital y urgencias

Para apoyar la evaluación de pacientes hospitalizados o de casos que requieren un resultado oportuno.



## Práctica equina y de producción

La batería de litio y los perfiles registrados por especie facilitan el uso en atención de campo.



## Clínicas móviles y visitas a domicilio

Sin instalación fija ni circuitos de fluidos, se adapta a una operación portátil.



### INSIGHT CLÍNICO

El resultado de electrolitos complementa la historia clínica, el examen físico y otros estudios. La decisión diagnóstica y terapéutica corresponde al médico veterinario.

# Listo para acompañar tu práctica

Especificaciones, costo y soporte.



TU CONSULTA

EN TU DÍA A DÍA



PARA LA VALORACIÓN CLÍNICA

- Complementa la evaluación de pacientes que requieren conocer su estado electrolítico.
- El perfil por especie aporta contexto para que el médico veterinario interprete el resultado.



PARA TU OPERACIÓN

- Cartucho único y calibración integrada para un flujo sin reactivos separados.
- Formato portátil para consultorio, visitas a domicilio y atención de campo.

ESPECIFICACIONES COMPLETAS



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Analitos     | K+, Na+, Cl–, calcio iónico y magnesio iónico   |
| Resultado    | 5 ± 0.5 minutos, calibración incluida           |
| Muestra      | 110 µL de sangre                                |
| Cartucho     | 5 en 1, con calibración integrada               |
| Portabilidad | Batería de litio, sin instalación fija          |
| Especies     | 6: perro, gato, oveja, conejo, caballo y ganado |

### Costo por prueba: \$70.00 MXN

Precio sugerido al cliente: \$200 MXN por estudio · Todo equipo incluye 1 año de garantía, kit de reactivos de arranque, instalación y capacitación sin costo.

### ¿Lo quieres en tu clínica?

WhatsApp +52 221 345 7476 · [powerlab.com.mx](http://powerlab.com.mx)

