

HEMOGRAMA DE 3 PARTES

HIGHTOP

Menu Analysis Review QC Auto-Test Print

Patient Name: Dog ID: 20 Date: 2018-11-06 15:50

Gender	Result	Unit	Param	Result	Unit	Param	Result	Unit
Male	12.2	10 ⁹ /L	WBC	12.2	10 ⁹ /L	PLT	212	10 ⁹ /L
	6.18	%	HGB	6.18	g/L	MPV	2.9	fL
	2.9	%	HCT	2.9	%	PDW	19.7	%
	10.9	%	MCV	10.9	fL	PCT	0.18	%
	10.9	%	MCH	10.9	pg	P-L	20.1	%
	10.9	%	MCHC	10.9	g/dL	P-LCC	50	10 ⁹ /L
	10.9	%	RDW	10.9	%			
	10.9	%	RDW-SD	10.9	fL			

WBC Histogram RBC Histogram PLT Histogram

Next Sample Check

Operator: admin Name: Dog Animal Category: Dog Date: 2018-11-23 01:51

HA-300Vet

((()))

Warning icons: High Voltage, Laser, Biohazard

Un hemograma mientras el paciente sigue contigo

21 parámetros y tres histogramas para orientar decisiones en la misma consulta.

HA-300 VET — Analizador de hematología 3 partes

Con 10 µL de muestra, el HA-300 VET entrega 21 parámetros y tres histogramas. El resultado queda listo para interpretar, imprimir y conservar en el expediente del paciente.

		
21	13	10 µL
PARÁMETROS	ESPECIES	POR MUESTRA

EN ESTA GUÍA

- 1

Lo que revela una muestra

Tres poblaciones celulares explicadas con claridad.
- 2

Características esenciales

Solo lo que importa durante la consulta.
- 3

Decidir en la misma visita

Resultado, seguimiento y soporte para tu clínica.


Lo que revela una muestra

Tres poblaciones celulares explicadas con claridad.



DIAGNÓSTICO

TECNOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO VISUAL

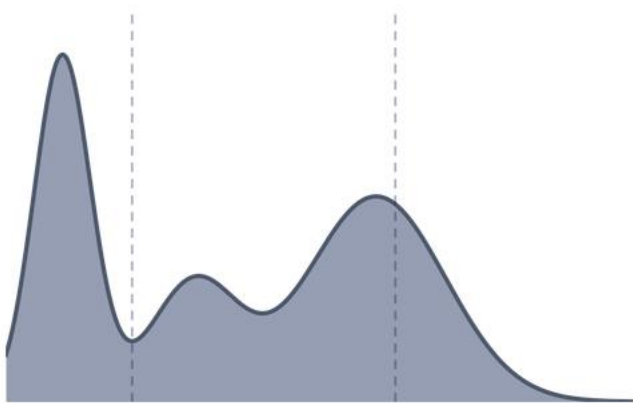


Diferenciación precisa

Visualiza las 3 poblaciones leucocitarias (linfocitos, células medias y granulocitos) para un triaje clínico eficiente.

ÚTIL PARA DETECTAR

- Infecciones
- Inflamación
- Estrés del paciente

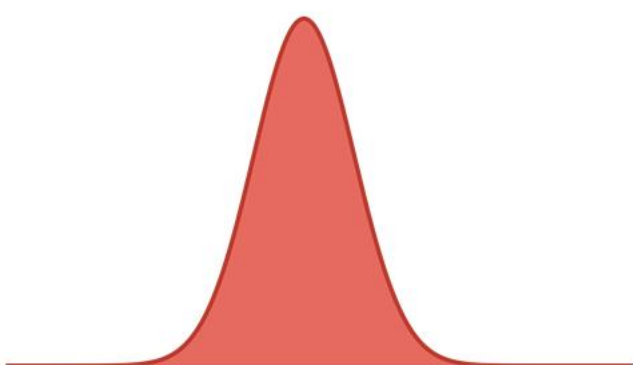


Morfología eritrocitaria

Curva de distribución de alta resolución que permite identificar variaciones en el volumen y posibles anemias de forma inmediata.

ÚTIL PARA DETECTAR

- Anemia
- Deshidratación
- Policitemia

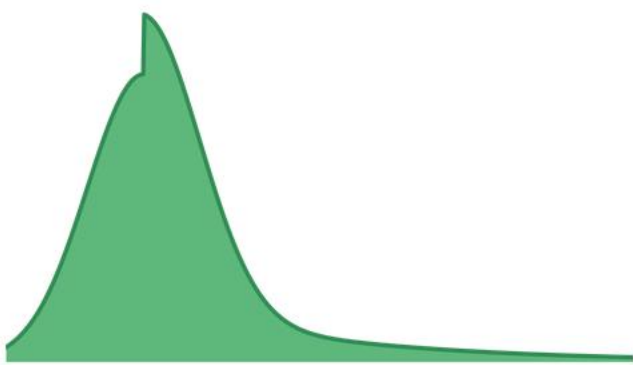

Sensibilidad plaquetaria

Detección optimizada de macroplaquetas y agregados, para recuentos confiables incluso en rangos críticos.

ÚTIL PARA DETECTAR

- Trombocitopenia
- Agregados o macroplaquetas

Curvas ilustrativas de la forma típica de cada población celular — no corresponden a un paciente real.

DIAGNÓSTICO

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA



Tipo de tubo

Tubo con EDTA K2 o K3 (tapón lila), Ø12–15 × 75 mm. También admite tubo capilar de 0.5–1.5 mL para modo capilar o prediluido.

01 Toma la muestra

Sangre venosa con jeringa o tubo al vacío, o una gota de sangre capilar. Mínimo 0.5 mL en modo sangre total.

02 Prepara el tubo

Vacía en el tubo con EDTA (tapón lila) y mezcla suave, según el protocolo de tu laboratorio.

03 Carga en el equipo

Presenta el tubo a la sonda del HA-300 VET; el equipo aspira la muestra automáticamente.



SEGURIDAD

La sonda de muestra es punzante y representa riesgo biológico: manéjala con las mismas precauciones de bioseguridad que usarías con cualquier muestra de sangre (guantes, disposición correcta de punzocortantes).

Características clave

Lo que hace distinto a este equipo dentro de tu consulta.



10 μ L de muestra

Modo sangre total y capilar. Ideal para pacientes pequeños y exóticos, sin necesidad de una toma grande.



60 muestras por hora

Ritmo suficiente para el flujo de un día normal de consulta, sin que el equipo se vuelva el cuello de botella.



Modo veterinario por especie

Eliges la especie en pantalla y el equipo ajusta automáticamente los rangos de referencia.



Ficha lista para el expediente

El resultado se imprime con nombre, dueño y edad del paciente, listo para archivar o entregar.



Pantalla táctil a color

Análisis, historial, control de calidad e impresión desde un mismo menú.



Cabe en tu consultorio

Equipo de mesa, sin obra ni instalación especial. Convive con tu equipo actual.

Decidir en la misma visita

Resultado, seguimiento y soporte para tu clínica.



TU CONSULTA

EN TU DÍA A DÍA



PARA EL PACIENTE Y EL DUEÑO

- Le das al dueño una respuesta en la misma visita, en vez de pedirle que espere el resultado de un laboratorio externo.
- Ante una urgencia, el hemograma completo está listo en minutos, cuando cada minuto importa.



PARA TI Y TU CLÍNICA

- Puedes decidir el tratamiento o los siguientes pasos en el momento, sin perder el seguimiento del caso.
- El modo veterinario evita que tengas que calcular a mano los rangos de referencia por especie.

ESPECIFICACIONES COMPLETAS

HIGHTOP

Parámetros reportados	21 parámetros + 3 histogramas (WBC, RBC, PLT)
Diferencial	3 partes (linfocitos, monocitos, granulocitos)
Volumen de muestra	10 µL – modo sangre total y capilar
Especies	13 especies con modo veterinario integrado
Selección de especie	Selector en pantalla, ajusta rangos de referencia automáticamente
Velocidad	60 muestras por hora
Pantalla	Táctil a color – análisis, historial, control de calidad e impresión desde un mismo menú
Formato	Equipo de mesa, sin obra ni instalación especial
Impresión de resultado	Incluye ficha con nombre, dueño y edad del paciente

TU CONSULTA

SOFTWARE INCLUIDO

- 

Software de gestión veterinaria HighTop (incluido, sin costo)

Además de la ficha impresa, el equipo permite volcar los resultados a una computadora con el software de gestión veterinaria. Concentra el expediente digital del paciente (historial de estudios, valores por fecha) junto con los datos de la clínica, sin costo adicional sobre el equipo.

Costo por prueba: \$6.00 MXN

Precio sugerido al cliente: \$250 MXN por estudio · Todo equipo incluye 1 año de garantía, kit de reactivos de arranque, instalación y capacitación sin costo.

¿Lo quieres en tu clínica?

WhatsApp +52 221 345 7476 · powerlab.com.mx

